

# Medical-D

## USE OF CAMERA

For use with D and SMILE-mode

### DENTAL IMAGE

1. Turn camera 'ON'
2. Place distance positioner [1]
3. Dial mode [2] on 'D'  
(Automatic zoom to 100mm)
4. Place distance positioner to chin of patient
6. Make picture [3]



### DENTAL IMAGES (NO GLARE)

7. Dial mode [2] on 'D' (Automatic zoom to 100mm)
8. Mount the ringfilter and lensfilter
9. Position of lensfilter with white triangle 'UP'
10. Make picture [3]

### FACE IMAGE

1. Dial SMILE-mode [2] (Automatic zoom to 70mm)
2. Take a distance of around 100cm
2. Make picture [3]

To avoid cross-contamination it is recommended to disinfect the tip of the distance positioner prior to each use with a patient.

This user instruction has been compiled with care. Should you have any remarks please inform us at [office@dhm-dental.com](mailto:office@dhm-dental.com). DHM-dental BV is convinced to have done everything possible to safely and reliably market this product according to relevant guidelines. If despite these you believe this product does not meet qualities and standards reasonable to expect, you can report this to appropriate authorities.



DHM-dental B.V.  
Simon Stevinweg 48,  
6827BT Arnhem,  
the Netherlands



Medical-D® is a registered Trademark

USE CAMERA-D-mode\_aug2021.pdf



# Medical-D

## GEBRUIK VAN CAMERA

Voor gebruik met D en SMILE-mode

### DENTALE FOTO

1. Zet camera 'AAN'
2. Plaats afstandhouder [1]
3. Dial mode [2] op 'D'  
(Automatische zoom naar 100mm)
4. Plaats afstandhouder op kin van patient
6. Maak foto [3]



### DENTALE FOTO (GEEN GLANS)

7. Dial mode [2] op 'D' (Automatische zoom naar 100mm)
8. Monteer ringfilter en lensfilter
9. Draai de lensfilter met witte driehoek 'omhoog'
10. Maak foto [3]

### GEZICHTSFOTO

1. Dial mode op 'SMILE' [2] (Automatische zoom naar 70mm)
2. Neem aan afstand van ongeveer 100cm
2. Maak foto [3]

Om cross-contaminatie te voorkomen raden wij aan om de tip van de afstandhouder te desinfecteren voorafgaand aan het gebruik bij een patient.

Deze instructie is met zorg gemaakt. Mocht u desondanks opmerkingen hebben informeer ons via [office@dhm-dental.com](mailto:office@dhm-dental.com). DHM-dental is ervan overtuigd het nodige te hebben gedaan om dit product veilig en betrouwbaar te vermarkten volgens de relevante richtlijnen. Mocht u desondanks van mening zijn dat dit product niet voldoet aan de kwaliteit en normen die u er redelijkerwijze aan mag stellen dan kunt u dit melden bij de daartoe geautoriseerde instanties.



DHM-dental B.V.  
Simon Stevinweg 48,  
6827BT Arnhem,  
the Netherlands



Medical-D® is een geregistreerd handelsmerk

